




PT K

PASSIV SELBSTLIGIERENDES
METALLBRACKET

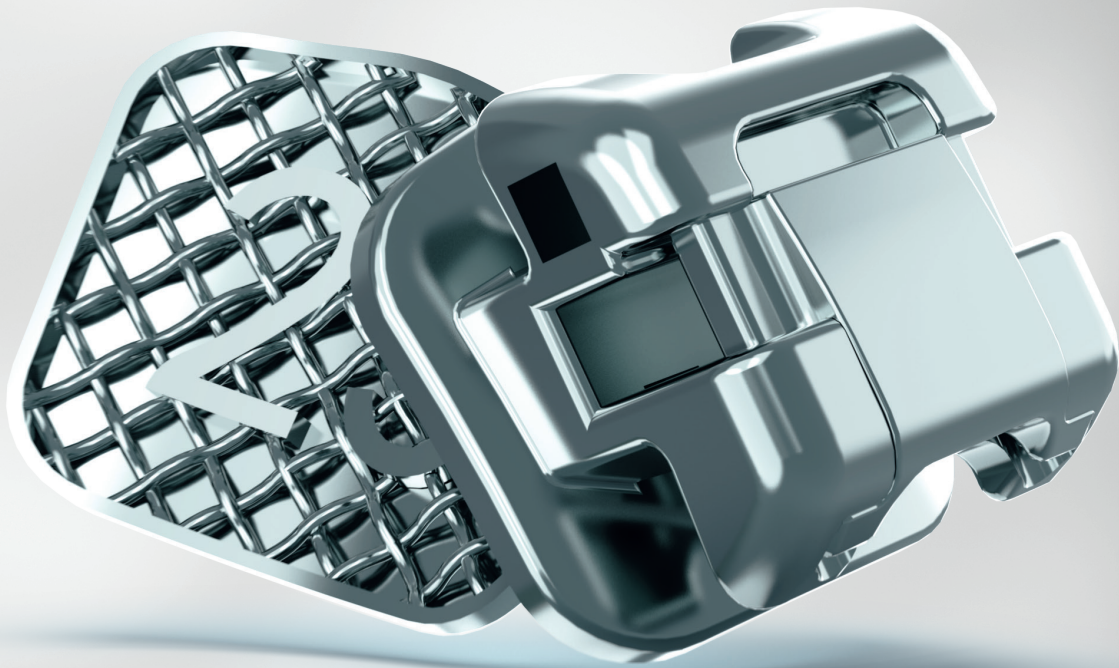




PERFEKTES DESIGN FÜR MAXIMALE BEHANDLUNGSFREIHEIT

PT K Brackets sind echte Allrounder und wie gemacht für individuelle Behandlungen. Drei wählbare Torquestufen, Drop-in-Hooks sowie horizontale und vertikale Hilfsslots bieten dabei eine beeindruckende Flexibilität im Therapieverlauf. Die stark abgerundeten Kanten und das insgesamt kompakte Design sorgen zugleich für einen hohen Tragekomfort und eine dezente ästhetische Erscheinung.

Der passiv selbstligierende Verschlussmechanismus ermöglicht ein nahezu freies Gleiten des Bogens im Slot, wodurch die Friktion reduziert und sanfte, gleichmäßige Kräfte übertragen werden – für schonende, kontrollierte Zahnbewegungen.

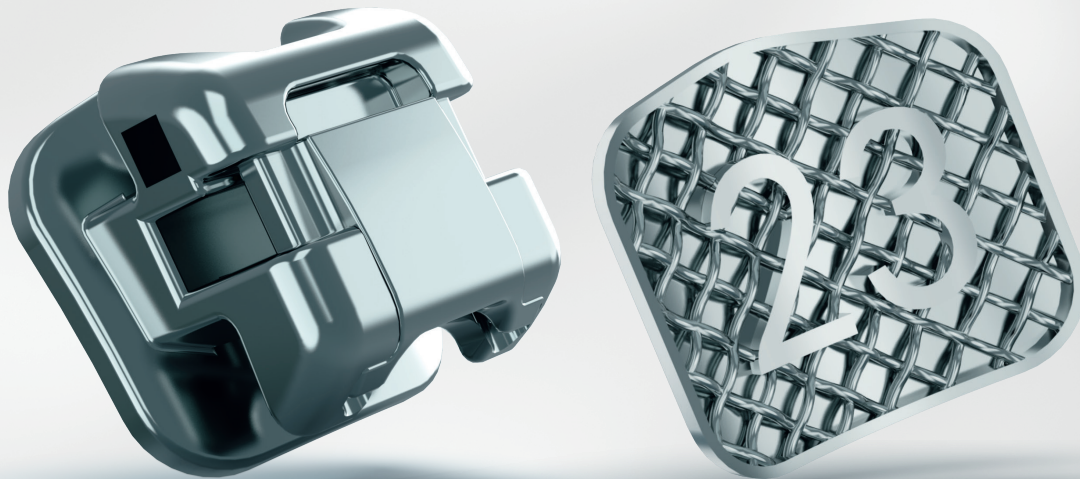




BIS INS KLEINSTE DETAIL DURCHDACHT


Komfortabel & ästhetisch

Mit seiner reduzierten Größe und den abgerundeten Kanten bietet das PT K Bracket einen hervorragenden Tragekomfort bei ansprechender Ästhetik.

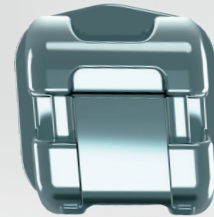


Hochpräziser Slot

Im Metallspritzgussverfahren aus hochwertigem 17-4 Edelstahl gefertigt, gewährleisten die hochpräzisen Slots eine exakte Übertragung der Bracketwerte bei maximaler Torquekontrolle.

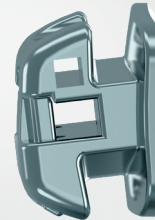


Leichte Identifikation

Farbcodierung und Basis-Lasermarkierung sorgen für eine rasche Orientierung und erleichtern die Wahl des richtigen Brackets.

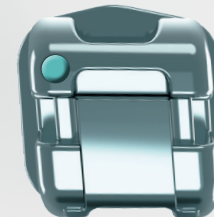


Zuverlässiger Halt am Zahn

Für einen optimalen Haftverbund sorgt die 80 Gauge-Gitternetzbasis.

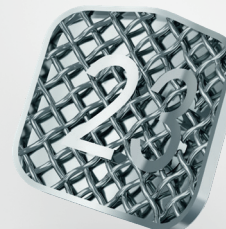


OPTIMALE KONTROLLE & EFFIZIENZ

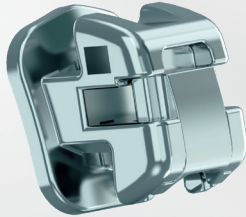


Drei wählbare Torquestufen

PT K Brackets sind mit High, Standard oder Low Torque erhältlich und unterstützen dadurch eine präzise Torquekontrolle der Frontzähne – für individuell beste Ergebnisse.

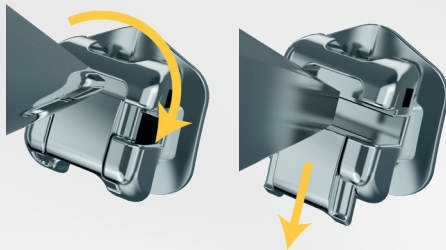


Bequeme Bogenwechsel

Der Schiebeclip lässt sich einfach öffnen und schließen, wodurch Bogenwechsel erleichtert und in kürzerer Zeit erfolgen können.

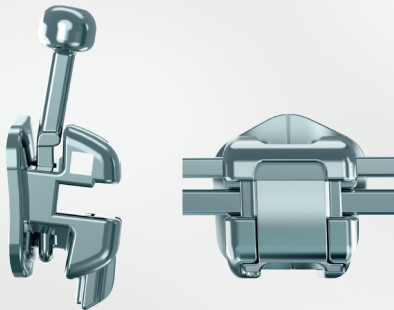

Mehr Flexibilität

Ein horizontaler (max. .016" / .016" x .016") sowie vertikaler Hilfsslot mit integrierbaren Drop-in-Hooks gewährleisten eine hohe klinische Flexibilität, indem sie den Einsatz von Doppelbogen-Mechaniken, Auxiliaries oder Elastomeren erlauben.

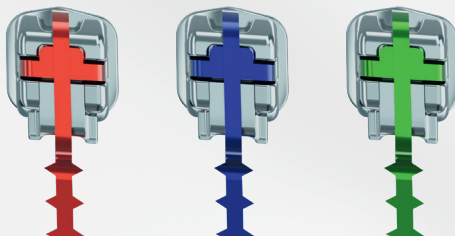

Punktgenaue Platzierung am Zahn

Positionierungshilfen mit vordefinierten Slotabständen zur Inzisalkante erleichtern das präzise Kleben der Brackets. High Torque (rot), Standard Torque (blau), Low Torque (grün)



Oberkiefer High Torque .022"

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm	rechts ohne Haken	rechts mit Haken	links ohne Haken	links mit Haken
Zentral	22°	5°	1,1	(11) DL286711	–	(21) DL286721	–
Lateral	13°	9°	1,05	(12) DL286712	–	(22) DL286722	–
Eckzahn	11°	5°	0,7	(13) –	DL286713H	(23) –	DL286723H
1. Prämolare	-11°	2°	0,85	(14) DL286714	DL286714H	(24) DL286724	DL286724H
2. Prämolare	-11°	2°	0,85	(15) DL286715	DL286715H	(25) DL286725	DL286725H

Unterkiefer High Torque .022"

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm	rechts ohne Haken	rechts mit Haken	links ohne Haken	links mit Haken
Zentral	-3°	2°	1,1	(41) DL286741	–	(31) DL286731	–
Lateral	-3°	4°	1,1	(42) DL286742	–	(32) DL286732	–
Eckzahn	13°	5°	0,85	(43) –	DL286743H	(33) –	DL286733H
1. Prämolare	-5°	4°	0,75	(44) DL286744	DL286744H	(34) DL286734	DL286734H
2. Prämolare	-17°	4°	0,95	(45) DL286745	DL286745H	(35) DL286735	DL286735H

Oberkiefer Standard Torque .022"

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm	rechts ohne Haken	rechts mit Haken	links ohne Haken	links mit Haken
Zentral	15°	5°	1,0	(11) DL286811	–	(21) DL286821	–
Lateral	6°	9°	1,1	(12) DL286812	–	(22) DL286822	–
Eckzahn	7°	5°	0,65	(13) –	DL286813H	(23) –	DL286823H
1. Prämolare	-11°	2°	0,85	(14) DL286814	DL286814H	(24) DL286824	DL286824H
2. Prämolare	-11°	2°	0,85	(15) DL286815	DL286815H	(25) DL286825	DL286825H



Drop-in-Hooks (10 Stück)
DL284000

Unterkiefer

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm
Zentral	-3°	2°	1,1
Lateral	-3°	4°	1,1
Eckzahn	7°	5°	0,75
1. Prämolare	-12°	4°	0,85
2. Prämolare	-17°	4°	0,95

Standard Torque .022"

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(41)	DL286841	–	(31)	DL286831	–
(42)	DL286842	–	(32)	DL286832	–
(43)	–	DL286843H	(33)	–	DL286833H
(44)	DL286844	DL286844H	(34)	DL286834	DL286834H
(45)	DL286845	DL286845H	(35)	DL286835	DL286835H

Oberkiefer

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm
Zentral	2°	5°	0,9
Lateral	-5°	9°	1,1
Eckzahn	-9°	5°	0,75
1. Prämolare	-11°	2°	0,85
2. Prämolare	-11°	2°	0,85

Low Torque .022"

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(11)	DL286911	–	(21)	DL286921	–
(12)	DL286912	–	(22)	DL286922	–
(13)	–	DL286913H	(23)	–	DL286923H
(14)	DL286914	DL286914H	(24)	DL286924	DL286924H
(15)	DL286915	DL286915H	(25)	DL286925	DL286925H

Unterkiefer

Zahn	Torque	Angulation	In/Out in mm
Zentral	-11°	2°	1,05
Lateral	-11°	4°	1,05
Eckzahn	0°	5°	0,75
1. Prämolare	-12°	4°	0,85
2. Prämolare	-17°	4°	0,95

Low Torque .022"

	rechts ohne Haken	rechts mit Haken		links ohne Haken	links mit Haken
(41)	DL286941	–	(31)	DL286931	–
(42)	DL286942	–	(32)	DL286932	–
(43)	–	DL286943H	(33)	–	DL286933H
(44)	DL286944	DL286944H	(34)	DL286934	DL286934H
(45)	DL286945	DL286945H	(35)	DL286935	DL286935H

1 Fall 5–5 OK/UK

Beschreibung	High Torque .022"	Standard Torque .022"	Low Torque .022"
ohne Haken	DL286750	DL286850	DL286950
3er mit Haken	DL286751	DL286851	DL286951
3–5 mit Haken	DL286753	DL286853	DL286953



dentalline GmbH & Co. KG

Goethestr. 47
75217 Birkenfeld
Deutschland

Tel.: +49 7231 9781-0

info@dentalline.de
www.dentalline.de