

www.psm.ms – implants for professionals

Professionelle Ergebnisse
mit unsichtbaren Mini-Pins



benefit

Attraktiver mit einem
perfekten Lächeln

Verankerung – der wichtigste Punkt in der kieferorthopädischen Behandlung

Immer dann, wenn Zähne oder Zahngruppen bewegt werden sollen, benötigt man eine Verankerung.


Eine verlässliche Verankerung ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben in der Kieferorthopädie.

Apparaturen wie der Headgear oder die Gesichtsmaske können als Verankerung eingesetzt werden. Werden diese oft als lästig empfundenen Geräte jedoch nicht ausreichend getragen, wird das Behandlungsziel nicht erreicht. Oft müssen dann gesunde Zähne gezogen werden, um ausreichend Platz für die korrekte Stellung der Zähne zu schaffen.

Das ungeliebte Tragen des Gesichtsbogens (Headgear) ist dank Titan-Mini-Pins nicht mehr notwendig.

Patienten.Info

Patienten.Info

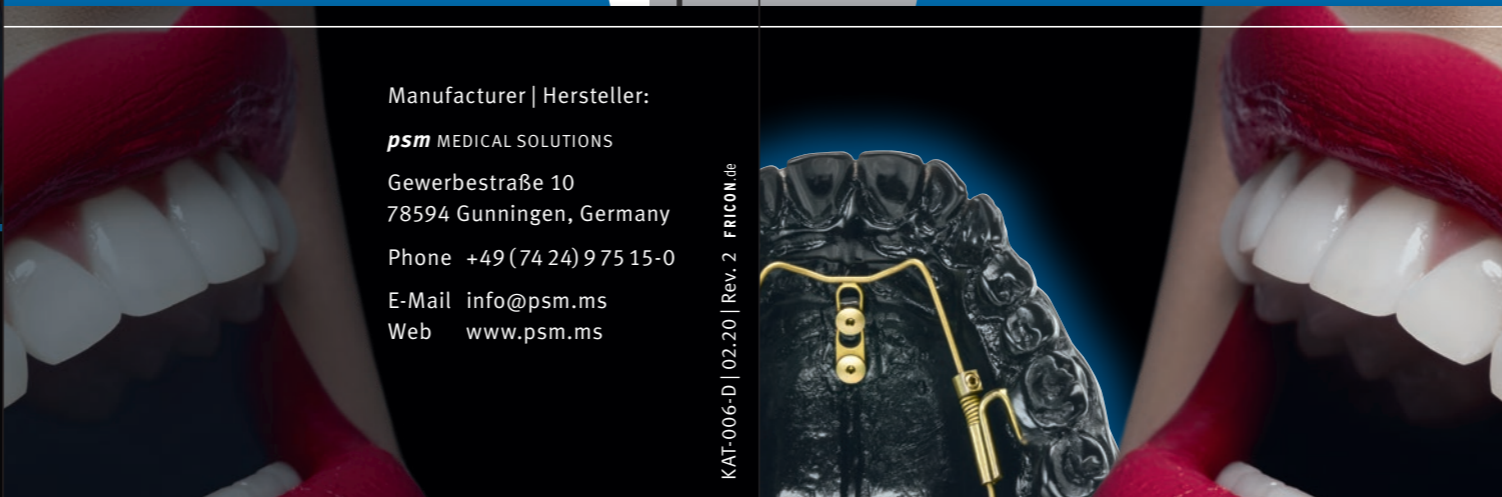

Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS

Gewerbestraße 10
78594 Gunningen, Germany

Phone +49 (74 24) 9 75 15-0

E-Mail info@psm.ms

Web www.psm.ms

KAT-006-D | 02.20 | Rev. 2 | FRICON.de

Von dem Produkt-Katalog abweichende Katalog- und Konstruktionsänderungen, die der Modifikation und Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Abbildungen, Produktbeschreibungen und Texte sind Eigentum der Firma psm MEDICAL SOLUTIONS. Weiterverwendung und Vervielfältigung durch Dritte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma psm MEDICAL SOLUTIONS. Alle Rechte vorbehalten!

Alle in dieser Broschüre genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Bildquellen: © Kurhan, © Poznyakov, © Seprimoris | Dreamstime.com

**Skelettale Verankerung in
der Kieferorthopädie**

Vorteile

- Unsichtbar zu tragen
- Kein Headgear
- Meist verkürzte Behandlungsdauer
- Einfache Hygiene
- Meist kein Zahnziehen nötig
- Sichere und einfache Anwendung
- Jahrelange Erfolge
- Made in Germany

Ein strahlendes Lächeln!

www.psm.ms – implants for professionals

made in Germany



Die unsichtbaren Mini-Pins – so individuell wie Sie selbst

Innovativ und sicher mit dem **BENEFIT**®-System

Mit den **quattro**® oder **BENEFIT**® Mini-Pins, die auch als Titan-Mini-Pins bezeichnet werden können, lassen sich sehr viele Verankerungsaufgaben elegant und „unsichtbar“ lösen. Im Gegensatz zu den Zahn-Implantaten, bei denen eine Einheilzeit in den Knochen abgewartet werden muss, können die Titan-Mini-Pins sofort genutzt werden, da sie nicht fest im Knochen verwachsen. Daher können sie auch nach der Nutzung schonend durch einfaches Herausdrehen entfernt werden.

Das **BENEFIT**®-System besteht aus Titan-Mini-Pins und verschiedenen Aufsätzen, die auf den Pins befestigt werden können. Um die Festigkeit zu erhöhen, werden manchmal zwei Titan-Mini-Pins verwendet, die dann mit einer kleinen Platte verbunden werden (**BENEplate**).

Lassen Sie sich durch das leichte Einsetzen faszinieren

Einsetzen der Pins

Das Einsetzen der Pins erfolgt nach örtlicher Betäubung der Schleimhaut und ist daher in der Regel schmerzfrei.

Ein Schnitt oder eine Naht ist hierfür nicht erforderlich. In einigen Fällen kann für kurze Zeit ein Druckgefühl entstehen.

Nach Abschluss der Behandlung erfolgt das einfache Herausdrehen des Titanpins. Dies kann ohne eine örtliche Betäubung durchgeführt werden.



Perfekte Zähne erhalten mit Hilfe von **benefit**

Wichtige Tipps zur Pflege

Unmittelbar nach Einsetzen ist der Titanpin fest im Knochen verankert. Damit er sich nicht lockert, sollte der Patient zwei Dinge beachten:

1. Gute Mundhygiene!

Bitte die Stelle um den Titanpin gut mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen (wie einen Zahn), damit sich keine Beläge und Bakterien ansammeln.

2. Keine Manipulationen!

Bitte nicht mit Zunge oder Fingern an dem Titanpin herumspielen. Es besteht die Gefahr der Lockerung durch ständiges Wackeln am Titanpin.

Der Weg zu Ihrem **schönen** & **gepflegten** Lächeln

benefit



Vorher



Nachher



Beneslider mesial/distal



Hybrid-Hyrax

BENEFIT® in vielen Situationen:

- Platzgewinnung ohne Zahnextraktion: **Der Beneslider**
- „Unsichtbarer“ Lückenschluss: **Der Mesialslider**

benefit

BENEFIT® Kappe (Abutment)



benefit

BENEFIT® Mini-Pin



1:1

benefit

BENEplate



quattro

quattro Mini-Pin



1:1

